

مجال الاستخدام

إطارات النظارة هي تجهيزات طبية من الفئة الأولى (القاعدة 1 الفصل الثالث من الملحق الثامن من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 745/2017) التي يتمثل استخدامها الرئيسي في الاقتران مع عدسات العيون التي تُصرف بوصفة طبية لتصحيح العيوب البصرية. تتوافق الإطارات البصرية مع لائحة (الاتحاد الأوروبي) 745/2017

تنبيهات

لا يمكن استبعاد أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية بشكل خاص قد يتعرضون لردود فعل عكسية بسبب ملامسة المواد والعلاجات المستخدمة للإطارات. يأتي الإطار مع عدسات عرض، غير مُخصصة للاستخدام ولكن فقط للحفاظ على شكل النظارات والسماح بتجربة الإطار بشكل أقرب إلى الواقع النهائي.

الحفظ والتنظيف

يجب حفظ إطارات النظارة في درجة حرارة بين -10 درجة مئوية و+35 درجة مئوية في الحافظة الخاصة بها. تجنب تعريض النظارة للشمس في الأماكن المغلقة غير المكيفة (مثل لوحة قيادة السيارة) لأن درجات الحرارة التي يتم الوصول إليها في هذه الظروف قد تضر بوظائف الإطار. في حالة الملامسة العرضية لعوامل مثل المياه المالحة (مياه البحر)، مياه حمامات السباحة، المواد الكيميائية مثل مستحضرات التجميل، مُثبت الشعر، كريم الوقاية من الشمس وطارد الحشرات، يوصى بالإزالة الفورية بقطعة قماش ناعمة ورطبة. في حالة التلف (مثل الخدوش، التعتيم) نوصى باستبدال الأجزاء التالفة بقطع غيار أصلية. استخدم من أجل التنظيف قطعة قماش مبللة ومنظف عادي محايد وجفف بقطعة قماش ناعمة نظيفة. تجنب استخدام المذيبات (مثل الكحول والأسيتون) والمنظفات الكيميائية الأكالة التي يمكن أن تضر بكفاءة النظارة.

العلامة:

16 مكرر. توجد البيانات التعريفية للموديل داخل المنتج. يظهر تاريخ الإنتاج على العبوة الفردية

للبيانات والاتصالات

إذا لم يكن من الممكن الاتصال بمنفذ البيع الذي تم شراء المنتج منه، للشكاوى أو الأعطال، قم بتوجيه الطلب إلى: