

Rotulagem armações de grau

Campo de aplicação

As armações de vista dispositivos médicos de classe I (Regra 1 Capítulo III do anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745) cuja utilização principal é a associação a lentes oftálmicas para a correção de defeitos visuais. As armações de grau estão em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745

Advertências

Não é possível excluir que indivíduos particularmente sensíveis ou alérgicos possam manifestar reações adversas por contacto com os materiais e tratamentos utilizados nas armações.

A armação é fornecida com lentes de apresentação, que não se destinam ao uso, mas apenas a manter a forma dos óculos e a permitir testar a armação mais próxima à realidade final.

Conservação e limpeza

As armações de grau devem ser conservadas a uma temperatura incluída entre -10°C e $+35^{\circ}\text{C}$ no próprio estojo. Evite a exposição ao sol em ambientes fechados não condicionados (ex. painel do carro) porque as temperaturas atingidas em tais condições podem danificar a funcionalidade da armação.

Em caso de contacto com agentes como água salgada (água de mar), água da piscina, produtos químicos como cosméticos, laca para cabelo), protetores solares e repelentes para insectos, recomenda-se a remoção imediata com um pano macio humedecido.

Em caso de desgaste (por ex. riscos, opacidade), recomenda-se peças sobressalentes originais para a substituição.

Para a limpeza utilize um pano húmido e um detergente neutro normal e enxugue com um pano macio limpo.

Evitar a utilização de solventes (por ex. álcool e acetona) e detergentes químicos agressivos que podem comprometer a funcionalidade dos óculos.

Marcação

A identificação do modelo encontra-se no interior do produto. A data de produção está indicada na embalagem individual.

Comunicações/Contactos

Caso não seja possível contactar a loja onde o produto foi adquirido, para queixas ou anomalias encaminhar o pedido a:

www.original-vintage.com