

Etiquetado de monturas de gafas graduadas

Campo de uso

Las monturas de gafas graduadas son productos sanitarios de clase I (Regla 1, capítulo III del anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745), cuyo uso principal es la asociación con lentes graduadas prescritas para la corrección de defectos visuales.

Los monturas de gafas graduadas cumplen con el Reglamento (UE) 2017/745

Advertencias

No se puede excluir que sujetos particularmente sensibles o alérgicos puedan manifestar reacciones adversas debido al contacto con los materiales y tratamientos utilizados para las monturas.

La montura viene con lentes de presentación no destinadas al uso, sino solo para mantener la forma de las gafas y ofrecer una prueba de la montura más cercana a la realidad final.

Conservación y limpieza

Las monturas de gafas graduadas deben conservarse a una temperatura entre los $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ en su funda. Evite la exposición al sol en ambientes cerrados y no acondicionados (por ejemplo: el tablero de un automóvil), ya que las temperaturas alcanzadas en estas condiciones pueden dañar la funcionalidad de la montura. En caso de contacto ocasional con agentes como agua salada (agua de mar), agua de piscina, productos químicos como cosméticos, lacas para el cabello, bloqueadores solares y repelentes de insectos, se recomienda la remoción inmediata con un paño suave húmedo.

En caso de desgaste (por ejemplo: arañazos u opacidad), se recomienda la sustitución con repuestos originales. Para limpiar, utilizar un paño húmedo y un detergente neutro normal, y secar con un paño suave y limpio. Evitar el uso de disolventes (por ejemplo: alcohol y acetona) y detergentes químicos agresivos que puedan comprometer la funcionalidad de las gafas.

Marcado

El identificador del modelo se encuentra en la parte interna del producto. La fecha de producción se muestra en el empaque individual.

Notificaciones/Contactos

En caso de que no sea posible contactar con el punto de venta donde se compró el producto, para reclamaciones o anomalías, dirigir la solicitud a:

www.original-vintage.com