

Gözlük çerçevesi etiketi

Kullanım alanı

Gözlük çerçeveleri; ana kullanım amacı, görme kusurlarını düzeltmek üzere reçetelenmiş olan optik gözlük camlarını taşımak olan, Sınıf I tıbbi cihazlar (2017/745 sayılı AB Yönetmeliği EK VIII Kural 1 Bölüm III). Gözlük çerçeveleri, 2017/745 sayılı AB Yönetmeliğine uygundur

Uyarılar

Aşırı hassas veya alerjik bireylerin, çerçevelerin yapımında kullanılan malzeme ve uygulanan işlemler ile temas sonucunda advers reaksiyonlarla karşılaşabileceği unutulmamalıdır

Çerçeve, kullanım amacı güdülmeyen, sadece gözlüğün şeklini korumak ve çerçevenin nihai haline en yakın provasını sağlamak için tasarlanmış olan sunum gözlük camları ile birlikte verilir.

Koruma ve Temizlik

Gözlük çerçeveleri, gözetim altında olmak üzere -10°C ile 35°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır. Havalandırılmayan kapalı mekanlarda (örn. araba paneli) çerçeveyi güneşe maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır, zira bu ortamlarda ulaşılan sıcaklıklar çerçevenin işlevselliğini zedeleyebilmektedir.

Tuzlu su (deniz suyu), havuz suyu, kozmetik, saç spreyi, güneş kremleri ve böcek kovucu gibi kimyasal maddelerle temas halinde, yumuşak ve nemli bir bezle bu maddelerin derhal uzaklaştırılması önerilir.

Aşınma durumunda (örn. çizikler, opaklık) orijinal parçalarla değiştirilmesi önerilir.

Temizlik için nemli bir bez ve normal nötr deterjan kullanın ve temiz yumuşak bir bezle kurulayın.

Gözlük işlevselliğini tehlikeye atabilecek agresif kimyasal deterjanlar ile alkol ve aseton gibi çözücüler kullanmaktan kaçınınız.

İşaretleme

Model tanımlayıcısı ürünün içinde yer alır. Üretim tarihi, ürünün ambalajında belirtilmiştir

Raporlar/ Kişiler

Ürünü satın aldığınız satış noktasıyla iletişim kuramıyorsanız, şikâyet veya kusurlar için lütfen şuraya başvurun:

www.original-vintage.com